

## KNEO

### Knee-Release-Brace



KNEO 膝關節固定器用於矯正患有膝關節的膝關節骨關節炎（骨性關節炎）的疼痛緩解。其設計可根據需要將負載線移動到內側或外側。

釋放所需的力是由於自身重量而產生的。



CHW-Technik

OT-Products · GmbH

#### 适应症:

- 膝關節骨性關節炎，特別是 O 型腿或 X 腿畸形。
- 膝關節受傷，需要單側緩解。
- 進行韌帶和半月板手術後，以確保手術效果。
- 膝關節受傷後，尤其不穩定。

#### 說明:

- KNEO 膝關節矯形器由腳部和側軌組成，並在腳踝區域形成關節。
- 腳底芯和側軌由不銹鋼製成。
- 在側軌的末端有一個可移動的墊子，該墊子配有尼龍搭扣墊並在小腿上附有小腿綁帶。
- 小腿綁帶可以根據需要適當補充彈性綁帶。
- 通過其作用而移動，負載線穿過膝關節延伸到

內側或外側。

- 減輕疼痛及相應區域的壓力負擔。
- 釋放膝關節半月板上壓力所需的力是由伸直站立的腿產生的。

#### 特點:

- 減輕內側或外側關節磨損的疼痛，避免嬉戲和肌肉衰竭（尤其是老年患者）。
- 無膝關節矯形器，佩戴舒適度高（膝關節關節無滑動）。
- 易於使用。矯形器用鞋子收緊並用小腿帶固定。
- 可以舒適地穿在褲子下面。
- 輕巧。
- 小腿墊和皮帶可拆洗。
- 運動墊可防止小腿在皮膚上摩擦。
- 避免對腿部敏感部位施加壓力-墊位於腓骨的下方。
- 高矯正效果。

- 鼓勵患者活動。

CHW-Technik GmbH  
Helmut Wagner  
Kolligsbrunnen 1  
37115 Duderstadt  
Germany  
Telefon 0049 (0) 5527 998969  
Telefax 0049 (0) 5527 998967  
Mail h.wagner@chw-technik.de  
Internet www.chw-technik-gmbh.de

